

Kopplung in 2 Schritten



1. Leiten Sie mit iCom das Kopplungsverfahren ein.

Schalten Sie iCom ein. Drücken Sie die Bluetooth-Kopplungstaste auf der Rückseite ca. 2 Sekunden, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt.

iCom bleibt nun zwei Minuten lang im Kopplungsmodus. Führen Sie innerhalb dieser Zeit Schritt 2 durch.



2. Schließen Sie dem Voiis-Sender die Kopplung ab.

Betätigen Sie die schwarze Funktionstaste auf der Vorderseite des Voiis-Senders 3 Sekunden, bis die Leuchtenanzeige für Bluetooth schnell blinkt. Innerhalb einer Minute leuchten sowohl die blaue Bluetooth-Anzeige des iComs als auch die blaue Leuchtanzeige des Voiis-Adapters durchgängig. Das Kopplungsverfahren ist nun abgeschlossen.