



## Kopplung und Verbindung von iCom mit mit einem Jabra A120S Bluetooth Music Adaptor

**1. Laden Sie den Jabra Bluetooth Music Adaptor und Ihren iCom auf. Legen Sie die beiden Geräte nebeneinander.**

**2. Bereiten Sie Ihren iCom für das Kopplungsverfahren vor.**

Schalten Sie Ihren iCom ein. Leiten Sie das Kopplungsverfahren auf Ihrem iCom ein. Drücken Sie dazu die Bluetooth Kopplungstaste 2 Sekunden lang, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt. Ihr iCom bleibt zwei Minuten lang – bzw. bis das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist – im Kopplungsmodus.

**3. Bereiten Sie den Jabra Bluetooth Music Adaptor für das Kopplungsverfahren vor.**

Vergewissern Sie sich, dass der Musik-Adapter ausgeschaltet ist (kein LED-Blinken). Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (1), bis ein blaues Licht konstant aufleuchtet.

Der Adapter bleibt nun eine Minute lang – bzw. bis das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist – im Kopplungsmodus.

**4. Kopplung Ihres iCom mit dem Jabra Bluetooth Music Adaptor.**

Innerhalb einer Minute blinken sowohl die Multifunktionstaste des Adapters als auch die Bluetooth-Anzeige Ihres iCom langsam, was bedeutet, dass das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist. Zur Herstellung einer Bluetooth-Verbindung ist weder für den iCom noch für den Jabra Bluetooth Music Adapter ein Zugangsschlüssel erforderlich.

Sollte die LED des Adapters weiterhin konstant blau leuchten oder die iCom Bluetooth-Anzeige nach 1 Minute noch immer schnell blinken, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Verbinden Sie den Jabra Bluetooth Music Adapter mit Ihrem Audiogerät über die Anschlussbuchse und drücken Sie die Wiedergabe-Taste Ihres Audiogeräts. Sie können jetzt Musik in Ihren Hörsystemen hören.

**5. Verbinden.**

Nach einer erfolgreichen ersten Kopplung verbinden sich die Geräte künftig automatisch miteinander. Wenn Ihr iCom und der Jabra Bluetooth Music Adapter bereits gekoppelt sind, brauchen Sie die Geräte nur einzuschalten, um sie miteinander zu verbinden. Drücken Sie die Adapter-Taste nur so lange, bis das blaue Licht schnell blinkt. Halten Sie die Taste nicht so lange nieder, bis das Licht konstant ist, da sonst das Kopplungsverfahren erneut eingeleitet wird.

Bedeutung der Lichter der Multifunktionstaste am Jabra Bluetooth Music Adapter:

| Blaues Aufleuchten   | Kopplungsmodus                         |
|--|--|
| Langsames Blinken der blauen LED (im Dreisekundenrhythmus) | Übertragungsverbindung ist hergestellt |
| Schnelles Blinken der blauen LED                           | Gerätesuchlauf                         |

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Jabra Bluetooth Music Adapters.

Wichtige Informationen:

- Sobald Sie den Jabra Bluetooth Music Adapter mit Ihrem iCom verbinden, schalten Ihre Hörsysteme auf das EasyBluetooth Programm um. Um zu Ihrem üblichen Hörprogramm zurückzukehren, schalten Sie den Music Adapter aus.
- Beim Anschließen des Music Adapters an ein TV-Gerät kann es sein, dass die Lautsprecher des Fernsehers ausgeschaltet werden. Um dies zu verhindern, bietet Phonak Anschlussadapter für die Scart- oder Cinch-Buchsen des Fernsehers.
- Bitte beachten Sie, dass es bei der Verwendung des Music Adapters mit einem TV-Gerät aufgrund der Bluetooth-Übertragung zu kurzen Zeitverzögerungen kommen kann.