

iCom Bluetooth-Kopplung Anleitung VoiS Bluetooth-Sender


PHONAK

life is on



1. Bereiten Sie den Jabra VoiS Bluetooth-Sender für das Kopplungsverfahren vor.

Verbinden Sie das im Lieferumfang des VoiS Stereo enthaltene Audio-Kabel mit der Audio-Quelle (Fernseher, Stereoanlage) und der „IN“-Buchse auf der Rückseite des VoiS. Stecken Sie das Netzteil in den dafür vorgesehenen Anschluss des VoiS ein und verbinden Sie es mit der Stromsteckdose.

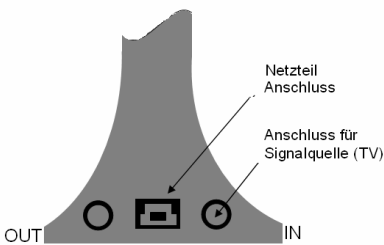

2. Bereiten Sie Ihren iCom für das Kopplungsverfahren vor.

Schalten Sie Ihren iCom ein. Leiten Sie das Kopplungsverfahren auf Ihrem iCom ein. Drücken Sie dazu die Bluetooth Kopplungstaste auf der Rückseite ca. 2 Sekunden lang, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt. Ihr iCom bleibt zwei Minuten lang – bzw. bis das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist – im Kopplungsmodus.

3. Kopplung des VoiS Bluetooth-Senders.

Betätigen Sie die schwarze Funktionstaste auf der Vorderseite des VoiS-Senders 3 Sekunden lang, bis die Leuchtanzeige für Bluetooth schnell blinkt. Innerhalb einer Minute leuchten sowohl die blaue Bluetooth-Anzeige des iComs als auch die blaue Leuchtanzeige des VoiS-Adapters durchgängig. Das Kopplungsverfahren ist nun abgeschlossen. Zur Herstellung einer Bluetooth-Verbindung ist weder für den iCom noch für den VoiS Bluetooth-Sender eine Kennung erforderlich.

4. Verbinden.

Nach einer erfolgreichen ersten Kopplung verbinden sich die Geräte künftig automatisch miteinander. Wenn Ihr iCom und der VoiS Bluetooth-Sender bereits gekoppelt sind, brauchen Sie iCom nur einzuschalten um eine Verbindung mit dem VoiS-Sender aufzubauen.

5. Verbindung trennen.

Sollten sie vorübergehend keine Übertragung des Audiosignals auf Ihre Hörsysteme wünschen, so können Sie durch Druck auf die iCom Multifunktionstaste zurück in ein akustisches Hörprogramm wechseln. Eventuell eingehende Bluetooth-Telefonate werden weiterhin über iCom und Hörsysteme signalisiert.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Wichtige Informationen:

- Beim Anschließen des Bluetooths-Senders an ein TV-Gerät kann es sein, dass die Lautsprecher des Fernsehers ausgeschaltet werden. Um dies zu verhindern, bietet Phonak Anschlussadapter für die Scart- oder Clinch-Buchsen des TV-Gerätes.
- Bitte beachten Sie, dass es bei der Verwendung des Bluetooths-Senders mit einem TV-Gerät aufgrund der Bluetooth-Übertragung zu kurzen Zeitverzögerungen kommen kann.