

# KURZBESCHREIBUNG

Ex-Hörer mit Mini-Otoplastik



**oticon**  
PEOPLE FIRST

## Batterie-Warntöne bei nachlassender Batterieleistung




2 Signal-Töne  
alle 15 Min.



4 Signal-Töne  
bei leerer  
Batterie

## Programm-Wechsel


2 Sek. drücken

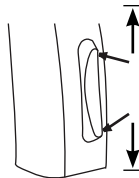

		P1
		P2
Optional		P3
		P4

## Standby (optional)

3 Sek. drücken

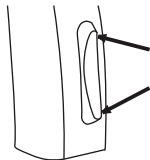


ODER



## Lautstärke-Regelung

1 Sek. drücken

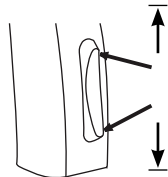

# KURZBESCHREIBUNG

Ex-Hörer mit Mini-Otoplastik



**oticon**  
PEOPLE FIRST

Ihr Hörgeräte-Akustiker



Links

[www.oticon.de](http://www.oticon.de)


## Batteriewechsel




Batteriegöße  
312

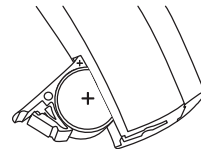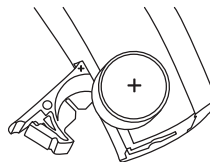

## AN/AUS

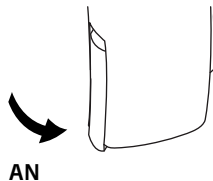

AN

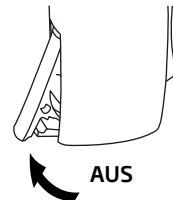

AUS

9087911500/02.10 Printed in Denmark